


ANABOX® 7 dagen

Pillendoosjes vullen:

Haal het doosje uit de weekdoos en verwijder het deksel door het aan één kant op te heffen (foto 2 en 3). Vul de vakjes volgens de voorgeschreven tijdstippen van inname (foto 1). Plaats het deksel terug op het doosje en klik om te sluiten; niet schuiven (foto 4). Zorg ervoor dat het grootste vakje overeenkomt met het vakje "s morgens".

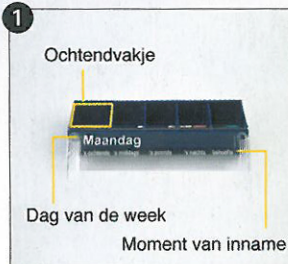

Om te reinigen, neemt u het dagelijkse pillendoosje uit de weekdoos en haalt het deksel eraf. U kunt de deksels en de doosjes reinigen in de vaatwasmachine.

Medicijnen innemen:

Het grootste vakje "s morgens" bevindt zich altijd links (foto 1). Voor innemen "s morgens" tot en met "s nachts" schuift u het deksel naar rechts (foto 2) tot het desbetreffende vakje open is en neemt de

geneesmiddelen eruit. Schuif daarna het deksel terug naar links tot de pillendoos gesloten is. Voor de inname van medicijnen uit het vakje "behoefte", schuift u het deksel naar links. Schuif daarna het deksel opnieuw naar rechts in de beginpositie (foto 5).

De dagelijkse pillendoos uit de weekdoos halen:

Neem eerst de dagelijkse pillendoos eruit

door deze aan de bovenkant zachtjes naar u toe te trekken (foto 6). Om deze terug vooraan te plaatsen, steekt u eerst de bovenkant in de box en duwt vervolgens onderaan om een lichte rotatie uit te oefenen (foto 7). Op het einde van de dag, schuift u de 6 pillendoosjes naar voren en plaatst u het lege doosje achteraan (foto 8).

